

## EZ CURE™ Plug – vereinfachte Knochenregeneration

Umseitig finden Sie unsere Auswahl an EZ CURE™ Plug, Preise sowie aktuelle Angebote – einfach ausfüllen und an uns zurückfaxen!



### EZ CURE™ Plug – eine homogene Matrix aus synthetischem MBCP™ Knochenersatzgranulat und reinstem porcinem Kollagen Typ I

#### EZ CURE™ Plug – READY TO USE

**EZ CURE™ Plug** ist ein formbarer, vollständig resorbierbarer Kollagen-Kegel (Größe: 8x15 mm) mit eingebetteten synthetischen, hochporösen und resorbierbaren MBCP™ Granulatpartikeln, die aus einer bei niedriger Temperatur gesinterten und resorbierbaren, zweiphasigen Calcium-Phosphat-Keramik (60% HA & 40%  $\beta$ -TCP) bestehen. Der Keramikanteil des in **EZ CURE™ Plug** befindlichen Knochenersatzmaterials ist biphasisch, mikro- und makroporös und verfügt über eine multidirektionale, vernetzte Struktur ähnlich jener der humanen Spongiosa.

Der formbare **EZ CURE™ Plug** Kollagenkegel aus reinstem porcinem Kollagen-Typ I fördert eine schnelle Anbindung der Blutplättchen sowie die Fibrinbildung und stimuliert die Bildung von Geflechtknochen, z.B. nach Zahnextraktionen. Die Konsistenz des Kollagens ermöglicht eine ideale Anpassung an die Form des Knochendefektes. Nach der Implantation von **EZ CURE™ Plug** resorbiert das Atelokollagen gleichmäßig über mehrere Wochen und wird durch neuen vitalen Knochen ersetzt. Die MBCP™



Partikel verleihen dem Augmentat eine dreidimensionale, osteokonduktive Knochenstruktur, gewährleisten eine langfristige Volumenstabilität und verhindern eine zu schnelle Resorption der umliegenden Knochenstruktur nach Extraktionen. Die MBCP™ Partikel werden über mehrere Monate langsam abgebaut und durch autologen Knochen ersetzt. Diese vorsorgliche, regenerative Behandlung der Zahnalveolen sorgt für stabile Knochenverhältnisse für anschließende Implantation bzw. Versorgung.


#### Produkteigenschaften/Produktvorteile::

- Materialart: Kegel aus porcinem Kollagentyp I und vollsynthetischen MBCP™ Granulatpartikeln
- MBCP™ besteht aus mikro- und makroporösen HA/ $\beta$ -TCP Partikeln
- Größe: 8 x 15 mm (Kegelform)
- vollständig resorbierbar
- hämostatische Wirkung des Atelokollagens
- Erhaltung des Knochenvolumens nach Zahnextraktion
- perfekte Anpassung des Kollagenkegels an den Knochendefekt unmittelbar nach Implantation
- einfache Anwendung, kein vorheriges Aufbereiten notwendig
- zuschneidbar im trockenen bzw. feuchten Zustand
- doppelt steril verpackt


Die **EZ CURE™ Plug** Kollagenmatrix erleichtert die Applikation bzw. Verarbeitung mit Knochenersatzmaterialien im Bereich der gesteuerten Knochen- und Geweberegeneration in der zahnärztlichen Chirurgie.

► ► ► Preise und Sparpakete auf der Rückseite


### Anwendung von EZ CURE™ Plug:

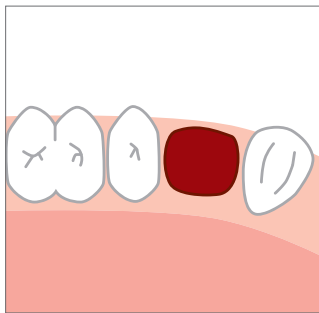


▲ Abb. 1: Extraktionsalveole

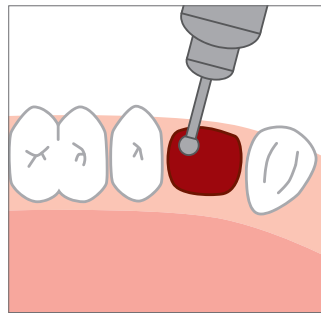

▲ Abb. 2: Aufbereitung

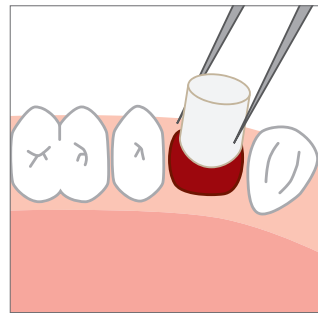

▲ Abb. 3: EZ CURE™ Plug Insertion

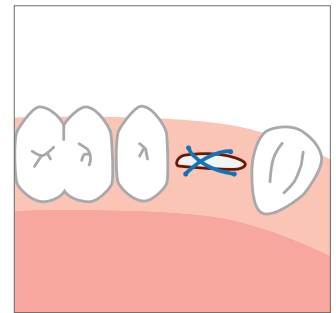

▲ Abb. 4: Wundverschluss

Der **EZ CURE™ Plug** Kollagenkegel wird doppelt steril verpackt geliefert und kann ohne vorheriges Aufbereiten in den Knochendefekt implantiert werden. Bei Bedarf kann das Material trocken bzw. nass (mit Blut oder physiologischer Kochsalzlösung) mit steriler Schere der gewünschten Form angepasst werden. Nach entsprechender Aufbereitung der Zahnalveole (Entfernen des Granulationsgewebes, Kürettage und evtl. Anrauen des Knochens mit Rosenbohrer) wird der **EZ CURE™ Plug** Kegel in den Knochendefekt eingebracht und anschließend spannungsfrei und speicheldicht verschlossen. Bei größeren Defekten sollte die

Eingriffsstelle zusätzlich mit einer resorbierbaren **Kollagen- (EZ CURE™)**, **Pericardium- (HEART®)** bzw. nicht-resorbierbaren **PTFE- (OpenTex®) Membran** abgedeckt werden.

#### Indikationen:

- Auffüllen von Extraktionsalveolen – Socket Preservation
- Auffüllen von intraossären Knochendefekten wie z.B. nach Zystektomie

EZ CURE™ Plug and MBCP™ brand is a registered trademark of Biomatlante, Manufacturer: Biomatlante, 5 Rue Edouard Belin, ZA Les 4 Nations, 44360 Vigneux de Bretagne, France

## Bestellfax

Ab einem Bestellwert  
von 199,- €\* liefern wir  
**FREI HAUS**

Bitte ankreuzen, ausfüllen und per Fax an: +49 6172 / 925 81 57

Hiermit bestelle ich verbindlich folgendes Angebot:

Artikel - Beschreibung	Größe	Inhalt/Pack	Artikel-Nr.	Preis/Pack	Bestellmenge
EZ CURE™ Plug Kollagenkegel	8 x 15 mm	1 x Kegel	EZ-01-0815	69,95 € <sup>1</sup>	
EZ CURE™ Plug Kollagenkg. Sparpaket	8 x 15 mm	5 x Kegel	EZ-05-0815	319,95 € <sup>1</sup>	

Praxis \_\_\_\_\_

Titel/Vor-/Nachname \_\_\_\_\_

Straße/Haus-Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Stadt \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

#### imperiOs GmbH

Hessenring 119-121

61348 Bad Homburg

Tel.: +49 6172/92 58 51

info@imperios.de

www.imperios-dental.de

**Hotline: 0800 6646936<sup>2</sup>**

<sup>2</sup> kostenlos aus dem deutschen Festnetz.

<sup>1</sup> Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt. und ggf. Versand. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Ab einem Bestellwert von 199,- €\* erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschland frei Haus.

Bitte schicken Sie mir weitere Angebote per E-Mail:

\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Schicken Sie mir bitte kostenlos ausführliches Informationsmaterial zum imperiOs Portfolio.